

「のびおくん」自己解凍形式ファイルの解凍方法について

このたびは弊社身長体重計通信ソフト「のびおくん」をご利用いただき、誠にありがとうございます。以下、ダウンロード完了後に自己解凍形式ファイルである「nobiokun.exe」を解凍する方法を記述します。

1. ダウンロード終了を確認後、「nobiokun.exe」を実行（ダブルクリック）する
実行すると下記のウィンドウが表示されます。

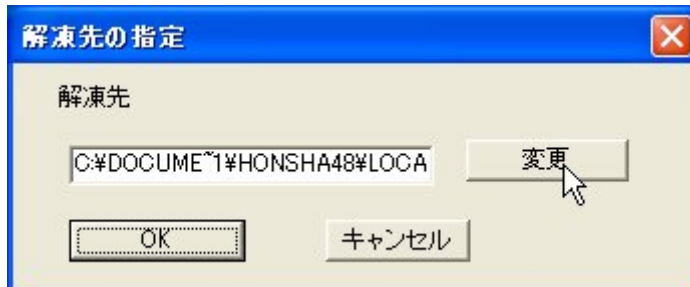


fig1. 解凍先の指定

初期の解凍先（テンポラリフォルダ）がテキストボックスに表示されています。任意の場所に解凍するために[変更]ボタンを押します。

2. 解凍場所を指定する
[変更]ボタンを押すと下記のウィンドウが表示されます。
(各ドライブはご使用のパソコンに依存します。)



fig2. フォルダの参照

初期状態では「マイコンピュータ」が選択されております。ここではもっとも分かりやすい「デスクトップ」を選択し、[OK]ボタンを押します。

解凍が実行され、デスクトップに展開されたファイルがフォルダ付で保存されます。インストールはフォルダ内の「setup.exe」を実行してください。また、インストール前には必ず同フォルダ内の「最初にお読み下さい.txt」をお読み下さい。

以上